



EMODIAL_{s.r.l.}



EMODIAL_{s.r.l.}

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALY)

Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414

www.emodial.it - info@emodial.it



EXIT-POCKET-PT[®]

Tasca protezione
catetere peritoneale



EXIT-POCKET-PT®

Descrizione

Tasca in TNT provvista di cintura elastica e sistema di regolazione in velcro.

Destinazione

Contiene i lumi del catetere tra una seduta dialitica e l'altra proteggendo l'exit-site.

Finalità

Preserva la cute che circonda il catetere e funge da barriera contro le contaminazioni microbiche esterne.

Vantaggi

- Rapido e facile posizionamento.
- Adatto a proteggere la cute dallo sfregamento meccanico del catetere.
- Comodo da indossare, può essere portato sotto i vestiti, non interferisce con le normali attività quotidiane.
- Aiuta a migliorare la qualità di vita dei pazienti cateterizzati.
- Rimozione semplice e veloce.



Tasca protezione catetere peritoneale

Istruzioni per l'uso

- 1** Inserire il catetere nella tasca e regolare le dimensioni della cintura sovrapponendo le due estremità, servendosi degli appositi attacchi in velcro. Tagliare l'estremità di cotone in eccesso (Fig. 1).
- 2** Regolare la tensione dell'elastico e tagliare l'estremità in eccesso (Fig. 2).



REFERENZE

Dati e specifiche tecniche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

CODICE	DIMENSIONE TASCA cm	N. PZ/SCATOLA
S2010/PT	24X7	50
S2013/PT	18X7	50

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I non sterile
Tipologia: Riutilizzabile 2-3 volte previo lavaggio a mano max. 30°C